


HỒ SƠ SẢN PHẨM

SILKSENSE



PN + HA Skinbooster

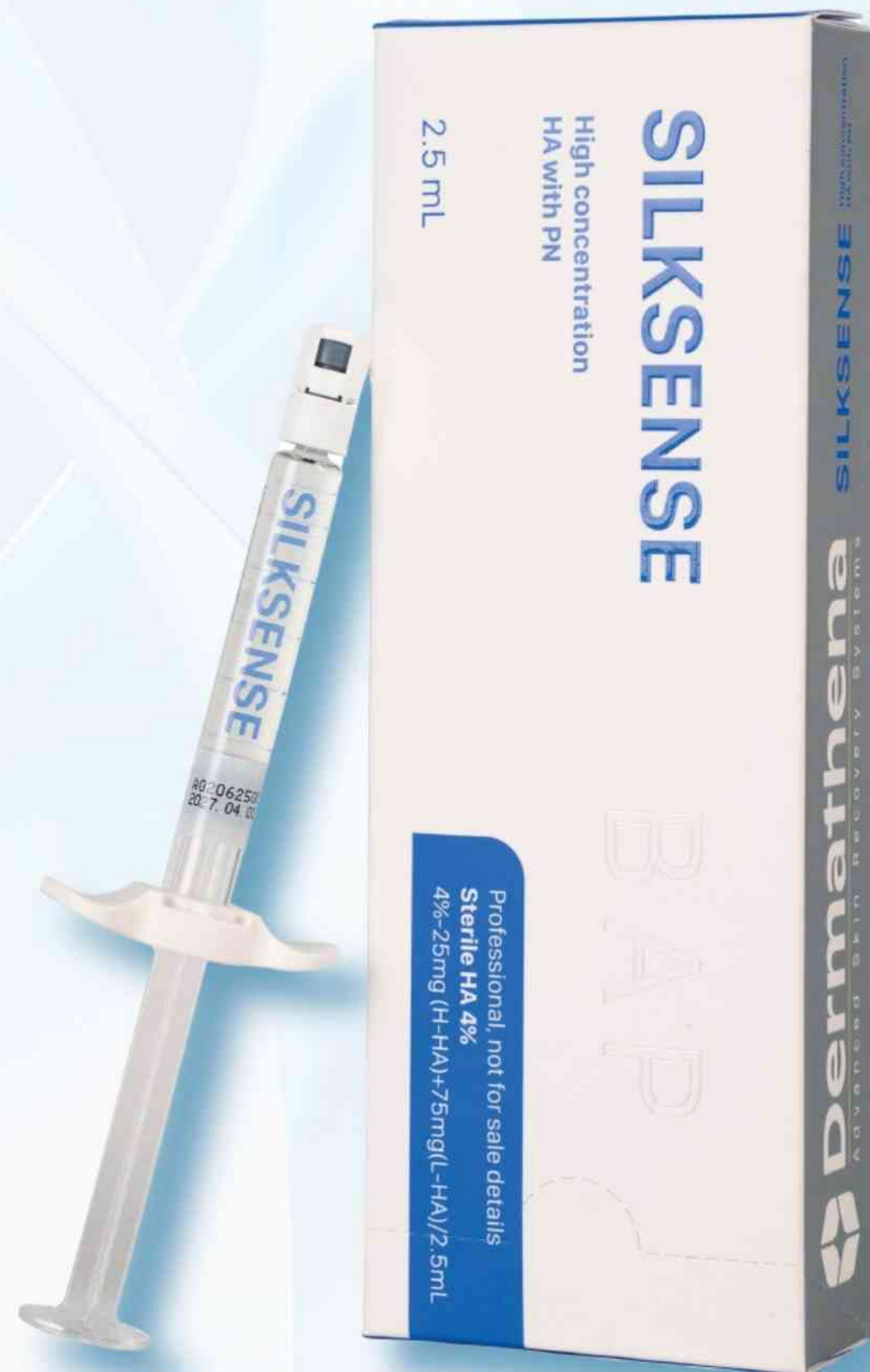




The logo features a blue flame icon above the word "EROS" in a dark blue serif font. Below "EROS" is the word "SILKSENSE" in a bold, blue, sans-serif font.

EROS SILKSENSE

Loại sản phẩm	Skinbooster
Đóng gói	1 Ống Serum
Khu vực sử dụng	Da mặt
Xuất xứ	Hàn Quốc

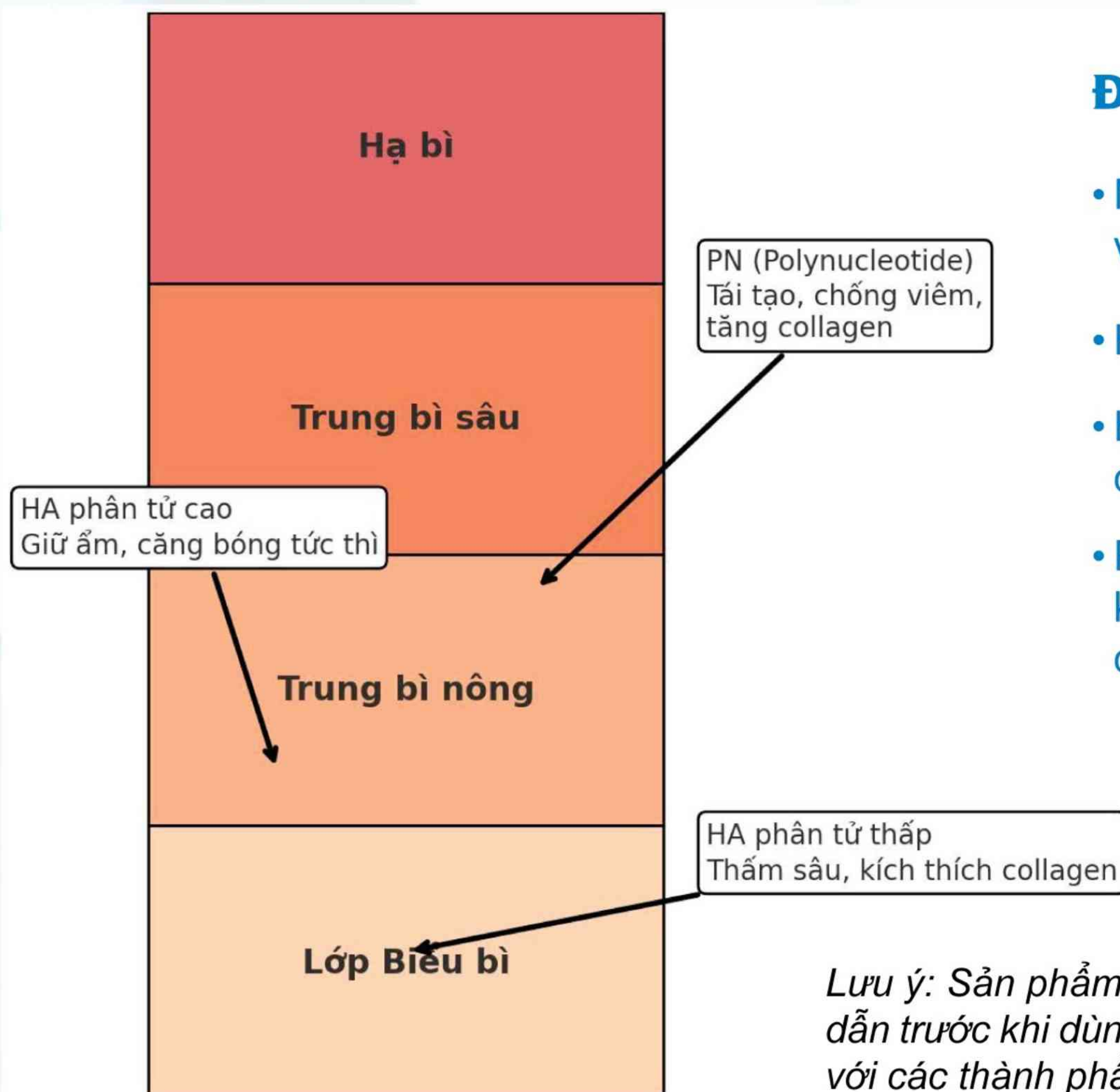


Đặc trưng

- Nồng độ PN 2mg/mL – giúp sản sinh collagen và elastin tốt hơn
- HA phân tử thấp giữ ẩm và cấp nước cho da
- HA phân tử cao tạo độ phòng và duy trì hiệu quả nâng cơ
- PN + HA thấp + HA cao = cải thiện đường nét khuôn mặt, dưỡng ẩm cho da và duy trì hiệu quả lâu dài

Lưu ý: Sản phẩm chỉ sử dụng bởi chuyên gia. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Không sử dụng trong trường hợp không dung nạp với các thành phần.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

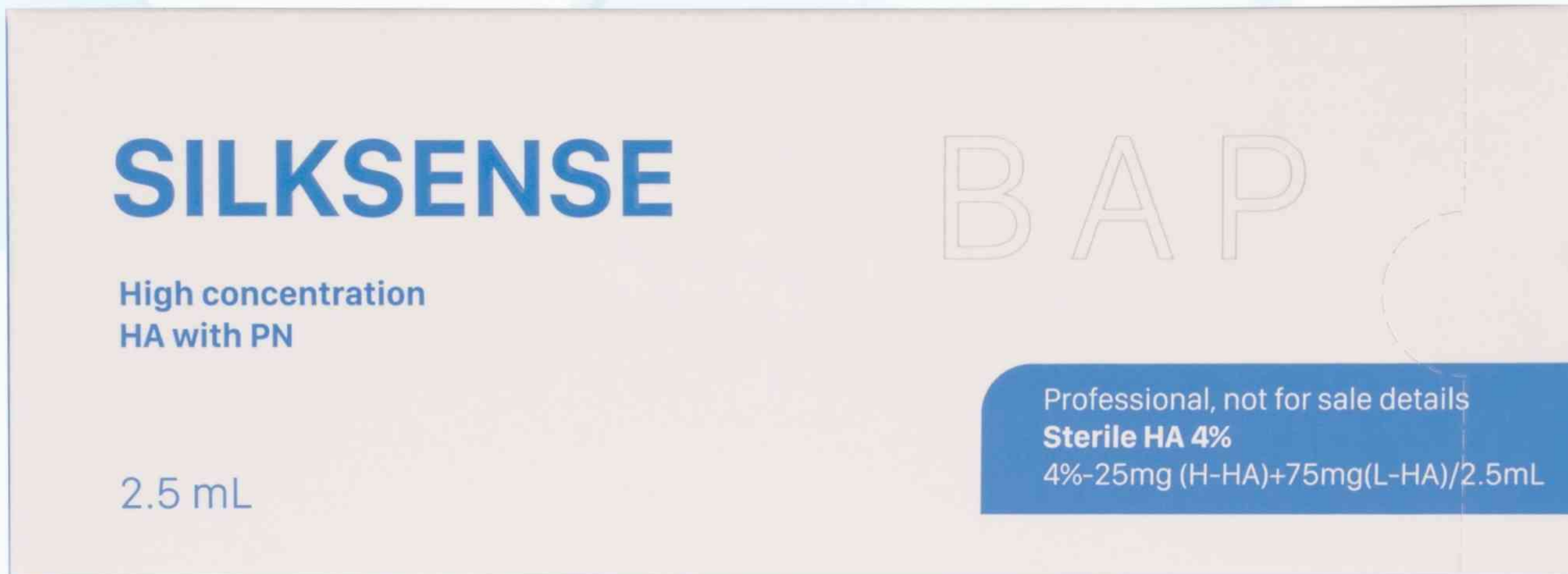

- Rất an toàn cho cơ thể vì không chứa các tác nhân liên kết chéo liên quan đến liên kết hóa học.
- Bằng sự kết hợp HA trọng lượng phân tử thấp và cao giúp dưỡng ẩm cho da và mang lại hiệu quả lâu dài
- Kích thích sản sinh Collagen & Elastin tự nhiên. Cải thiện cấu trúc mô da bị chảy xệ, đặc biệt vùng má hóp, rãnh cười, cổ
- Giữ nước cực tốt, dưỡng ẩm sâu. Thúc đẩy lớp smas nâng đỡ toàn bộ cấu trúc khuôn mặt
- Giảm rõ dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn. Hiệu quả nâng cơ tự nhiên, không tạo cảm giác “giả, đơ mặt”

* Đây là công thức “3 tầng” giúp vừa phục hồi cấu trúc, vừa cấp ẩm và bảo vệ da tối ưu

CÁCH SỬ DỤNG

- Mở bao bì sản phẩm có chứa ống tiêm
- Nhẹ nhàng tháo nút ống tiêm ra khỏi ống tiêm
- Gắn kim tiêm 27-gauge, 13mm, đây là kích thước được khuyến nghị vào ống tiêm trước khi sử dụng
- Khử trùng kỹ vùng điều trị trước khi tiêm
- Đâm kim vào vùng điều trị và tiêm từ từ một lượng thuốc vừa đủ tùy thuộc vào mức độ nếp nhăn
- Sau khi điều trị, massage nhẹ nhàng vùng điều trị để thuốc thẩm thấu đều

LIỆU TRÌNH ĐỀ NGHỊ


- Khuyến nghị thực hiện 3-5 buổi điều trị, mỗi buổi cách nhau 2-4 tuần để đạt kết quả tối ưu.
- Xin lưu ý rằng khoảng cách giữa các buổi điều trị có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng da và nhu cầu cụ thể của từng người.
- Kết quả thường thấy sau 2-4 tuần điều trị.
- Hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp tổng quan chung về kỹ thuật tiêm và các lưu ý khi tiêm, đảm bảo kết quả tối ưu đồng thời đáp ứng nhu cầu và độ nhạy cảm cụ thể của từng người.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & LƯU Ý




Chống chỉ định với các đối tượng	Nhóm 1	• Dị ứng (đặc biệt là dị ứng với các thành phần chất tiêm) • Tiền sử sẹo phì đại • Chảy máu bất thường và/hoặc đang điều trị thuốc chống đông • Mang thai/cho con bú • Các bệnh lý tự miễn (lupus, xơ cứng bì) • Bệnh tim mạch, huyết áp
	Nhóm 2	• Bệnh động kinh • Bệnh đái tháo đường • Nhiễm virus herpes type 1 (HSV-1) đang ở trong giai đoạn hoạt động • Nhiễm trùng • Nhiễm HIV • Các bệnh lý viêm da (giai đoạn cấp)
Để tránh bầm, chảy máu		• Tránh thực hiện vào ngày có chu kỳ kinh nguyệt. • Không dùng aspirin hay NSAIDS vài ngày trước và sau thủ thuật. • Tiêm chậm, tránh tạo áp lực quá cao làm vỡ thành các mạch máu nhỏ. • Thoa kem giảm viêm, phục hồi hoặc kháng sinh sau khi làm thủ thuật.
Để giảm đau		• Véo da hoặc căng da khi tiêm. • Thực hiện các mũi tiêm một cách chính xác. • Thay đầu kim thường xuyên trong khi tiêm. • Ủ tê hoặc tiêm tê trước khi thực hiện. • Trò chuyện với khách hàng trong khi tiêm.

6 vùng nguy hiểm trên khuôn mặt liên quan đến tổn thương mạch máu

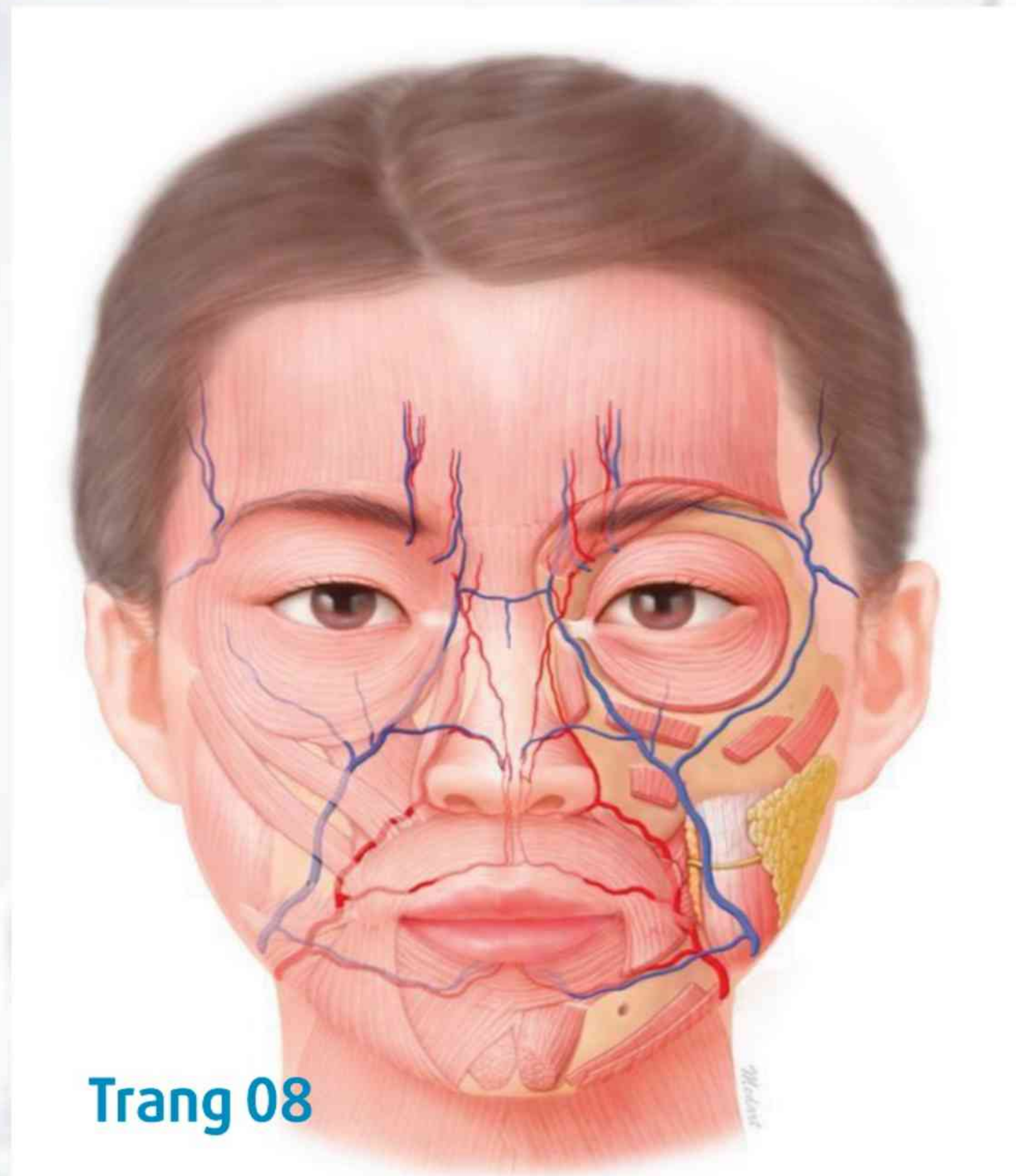

Trang 08

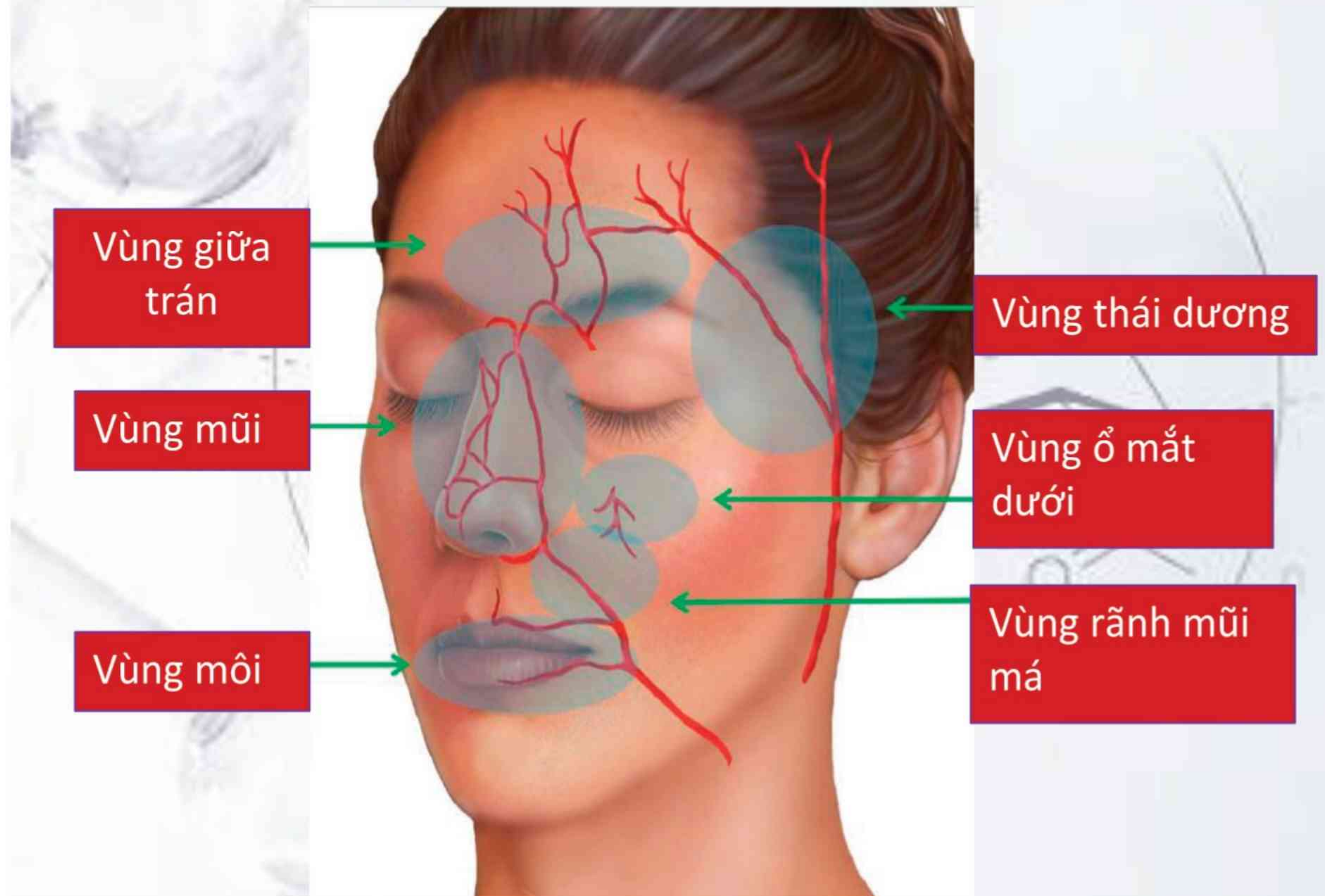

THÀNH PHẦN & ỨNG DỤNG



Main Ingredient

Non-cross linked HA 40mg/mL

High molecular weight HA (1.7 Mda) 10mg/mL

Low molecular weight HA (0.3 Mda) 30mg/mL

Polynucleotide 2mg/mL

HA trọng lượng phân tử thấp (75mg)


Trọng lượng phân tử thấp (thường dưới 50 kDa) thẩm thấu sâu vào lớp trung bì. Cấp ẩm sâu, giữ nước bên trong cấu trúc da.

HA trọng lượng phân tử cao (25mg)


Trọng lượng phân tử cao (trên 1000 kDa) chủ yếu lưu lại ở lớp biểu bì. Tạo màng ẩm bảo vệ, ngăn mất nước qua bề mặt da. Làm mịn và căng bóng tức thì.

Polynucleotide - PN (5mg ~ 2%)

Là các đoạn DNA tinh khiết chiết xuất từ cá hồi hoặc nguồn sinh học an toàn. Tái tạo tế bào, kích thích nguyên bào sợi sản sinh collagen, elastin. Giúp phục hồi sửa chữa các tổn thương các tế bào.

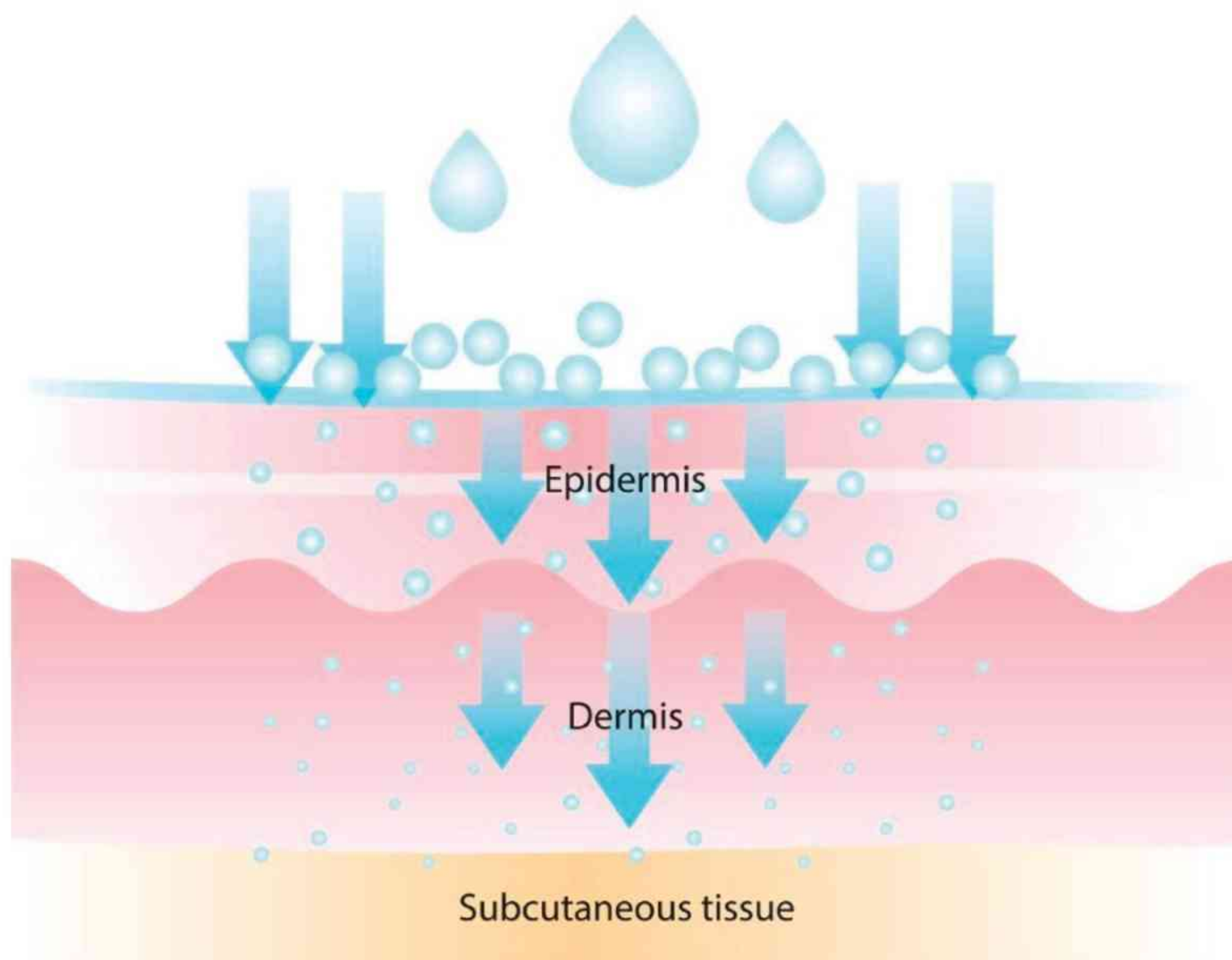

VỊ TRÍ TIÊM

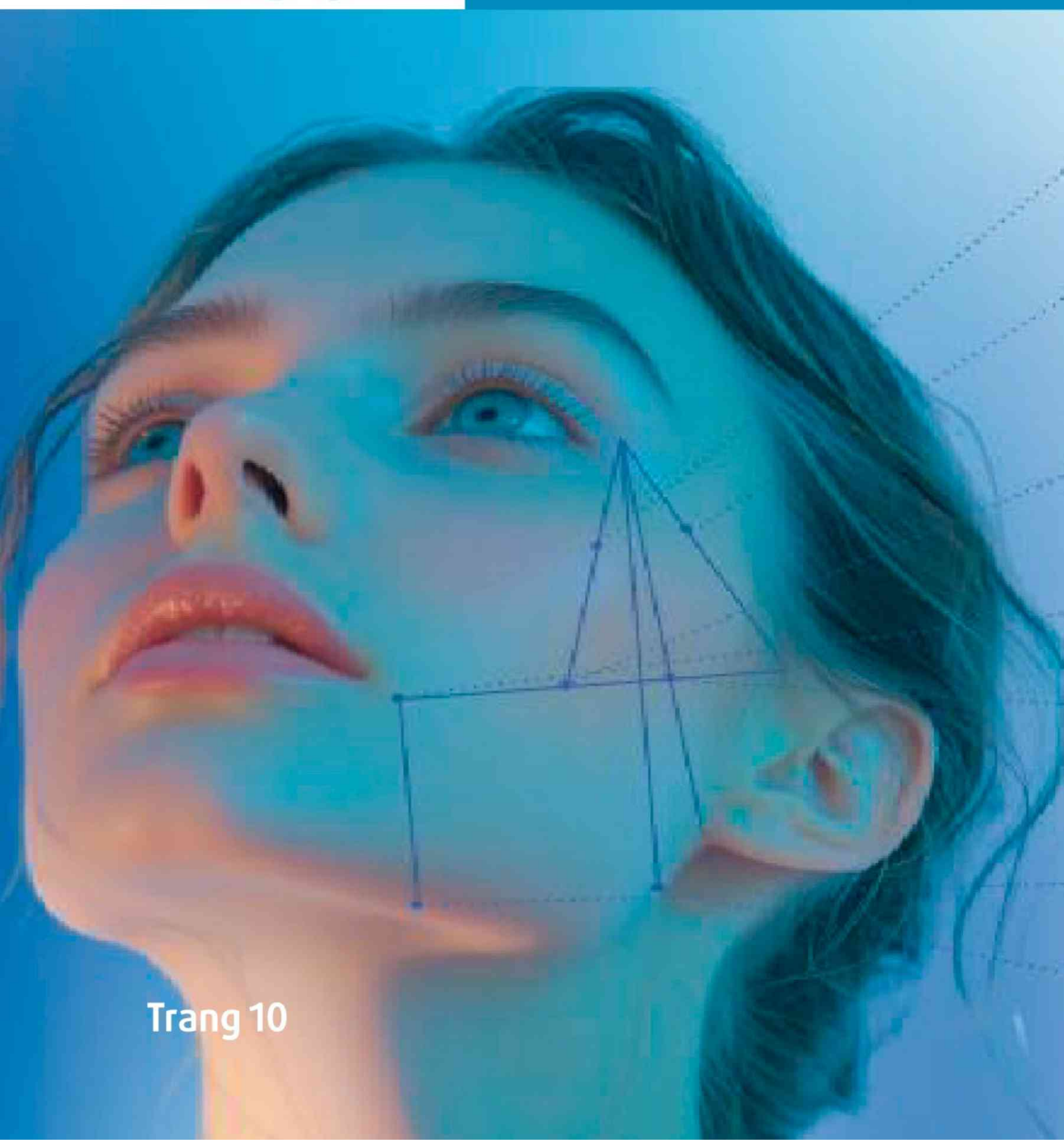

Má trước giữa (0.2cc)
Cấu trúc xương & Mỡ dưới mắt

Cùng xương gò má (0.2cc)
Cấu trúc xương & mỡ dưới mắt

Má trước (0.2cc)
Lớp hạ bì sâu & lớp mỡ dưới da


Đường Marionette (0.1cc)
Lớp hạ bì sâu & lớp mỡ dưới da

Má sau (0.2cc)
Lớp hạ bì sâu & lớp mỡ dưới da

Rãnh trước hàm (0.1cc)
Cấu trúc xương và lớp mỡ dưới da

Góc hàm dưới (0.2cc)
Lớp hạ bì và lớp mỡ dưới da

VỊ TRÍ TIÊM

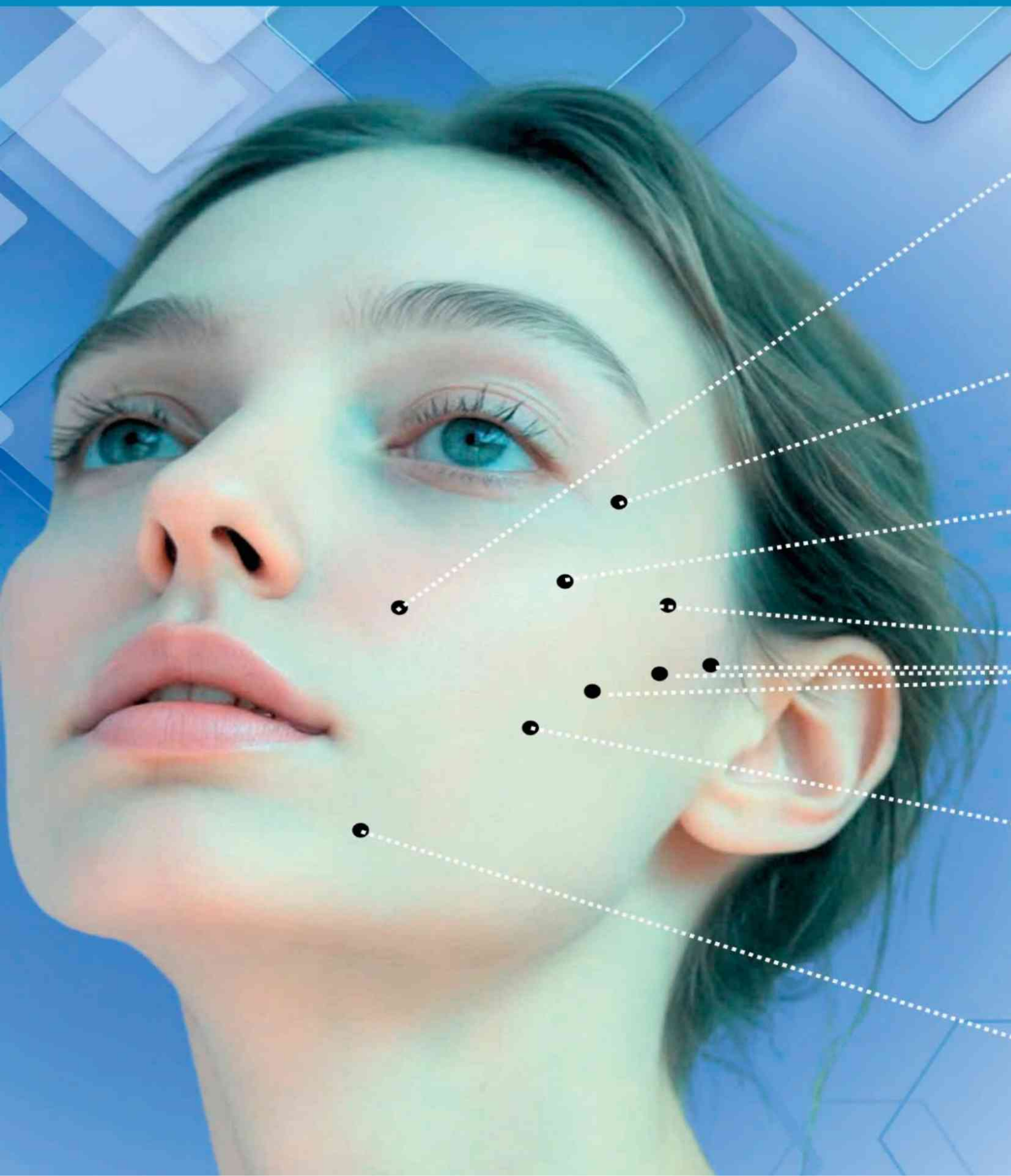

Cơ nâng môi trên (0.1ml)

Đuôi mắt (0.05ml)


Gò má lớn (0.1ml)

**Má sau
(0.2ml mỗi điểm)**

Má trước (0.1ml)


Cơ dao (0.1ml)

Trang 11

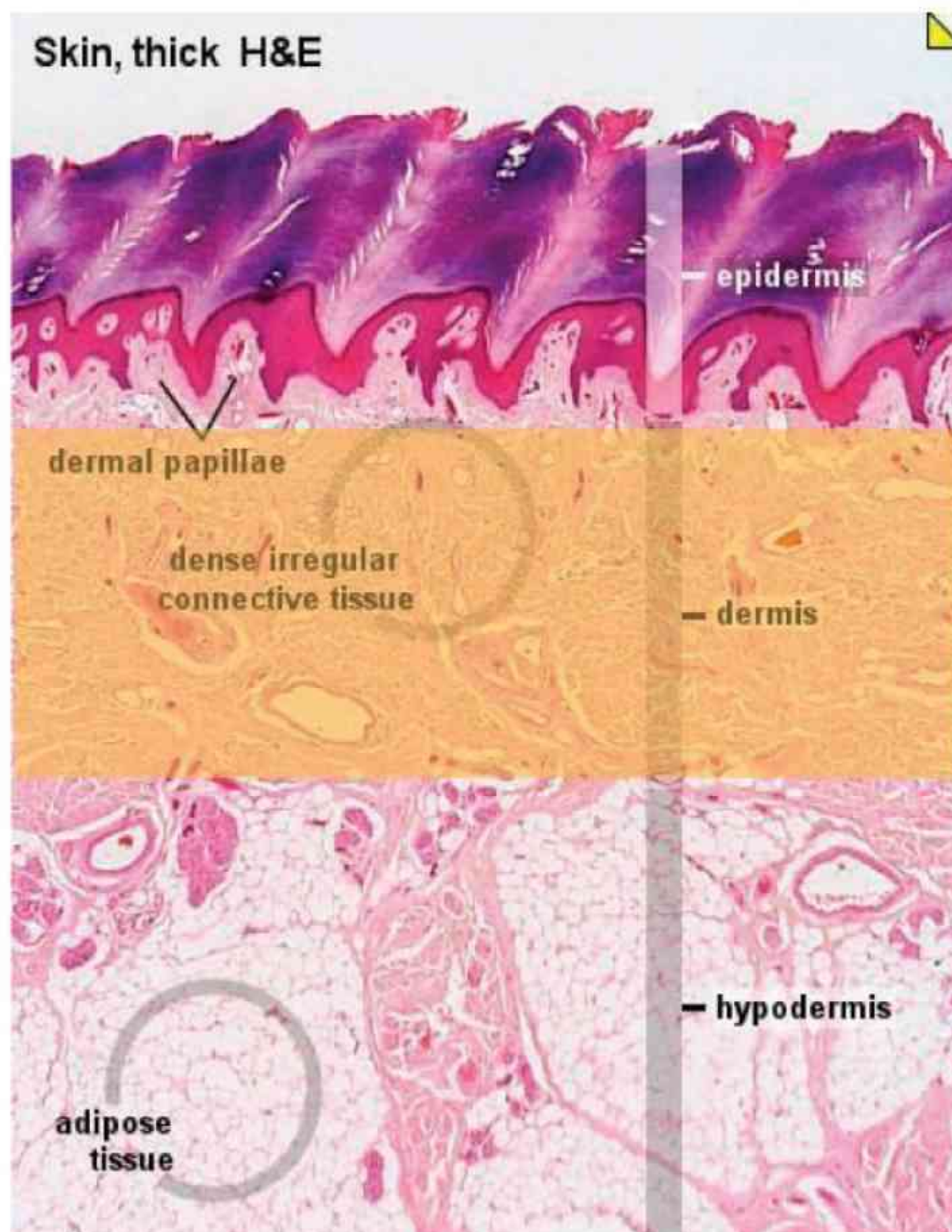


Tiêm vào lớp trung bì
sâu nơi các nguyên
bào sợi đang sản sinh
collagen và chất nền
ngoại bào.

Breslow Depth

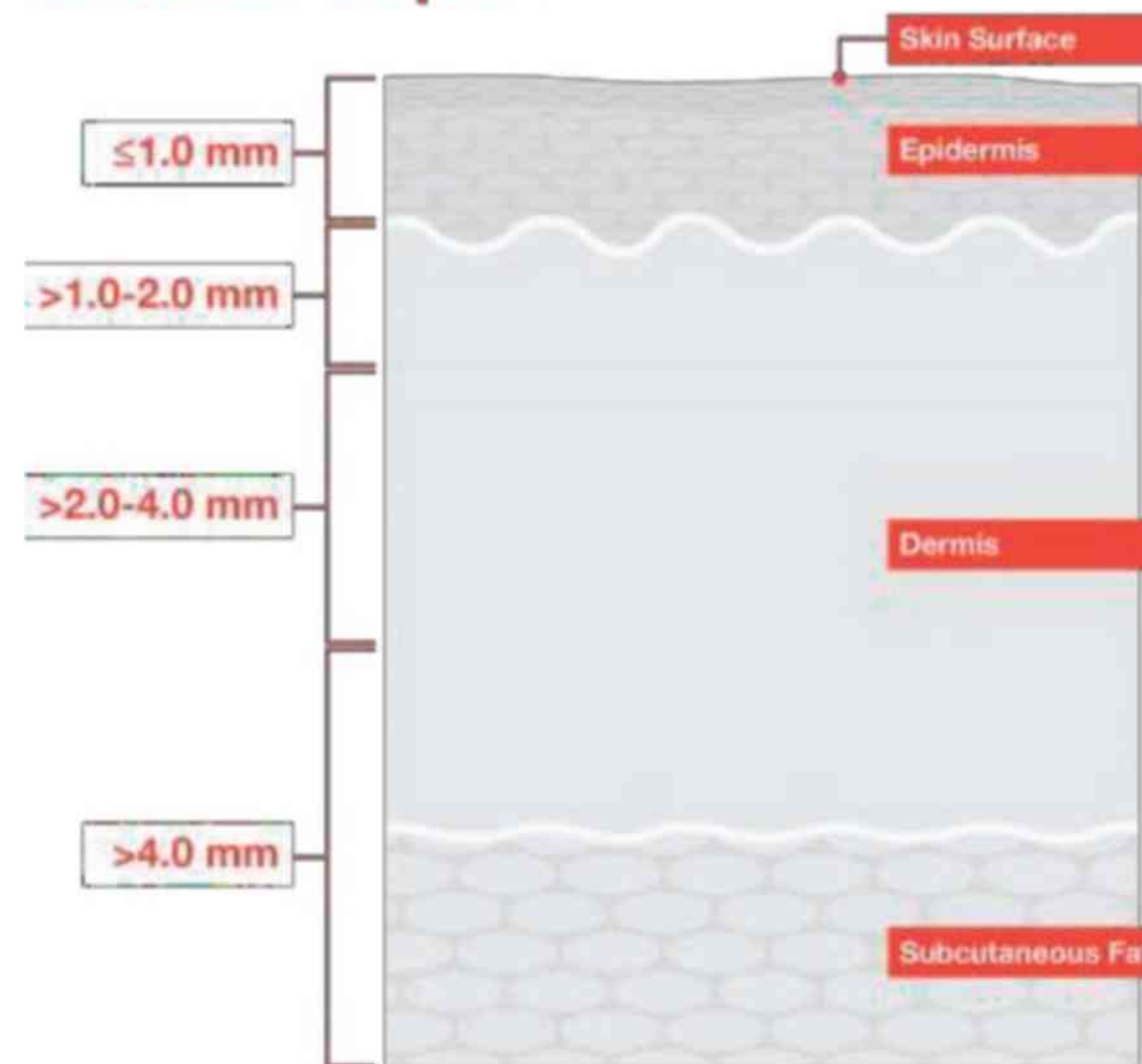

Độ sâu: Từ 2 đến
4mm tính từ bề mặt
da

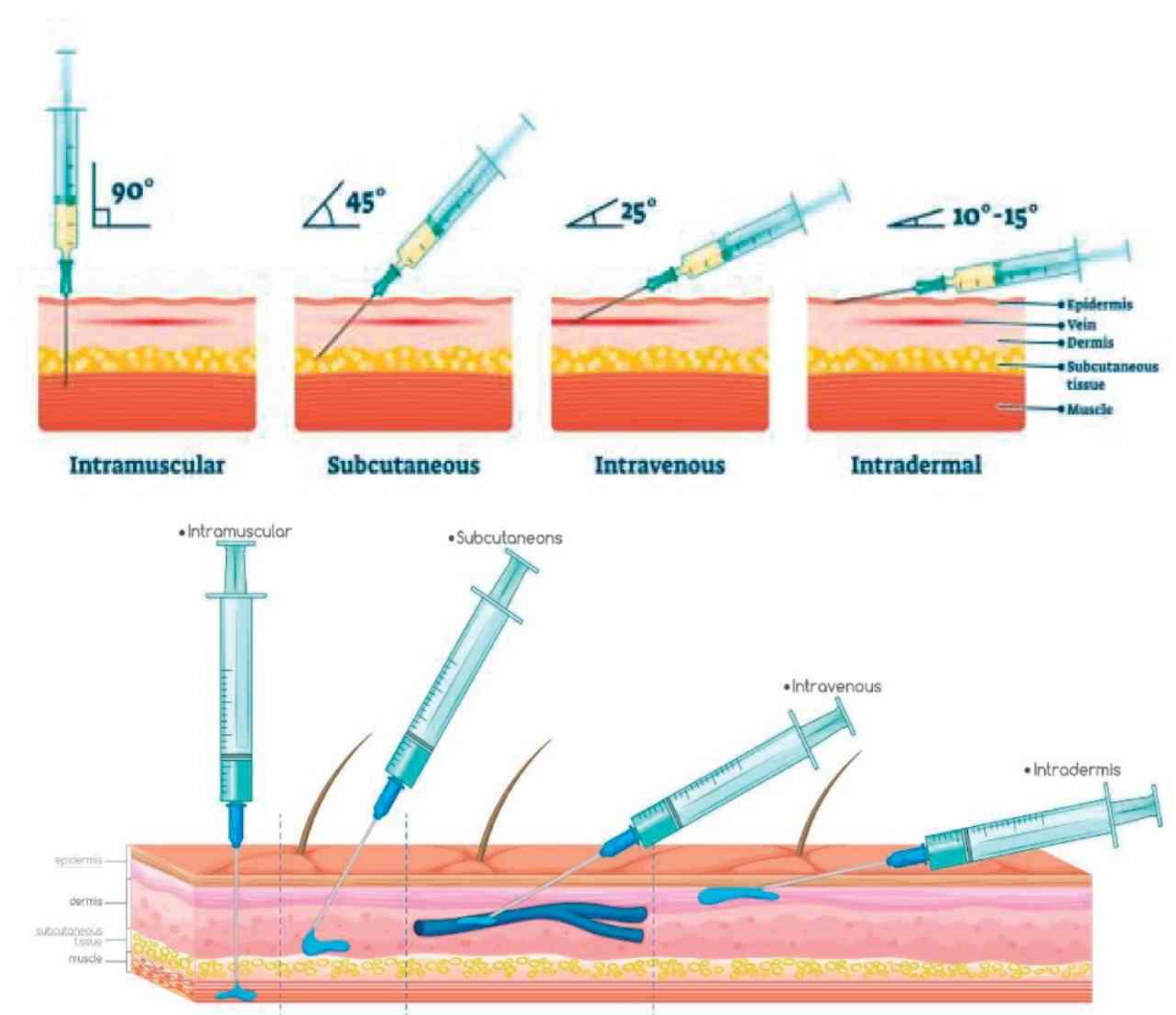

QUY TRÌNH TIÊM BAP 7 + 2 ĐIỂM



	<i>Tiêm BAP bằng kim 27G – 13mm.</i>
Bước 1	Làm sạch bằng nước muối và cồn vàng.
Bước 2	Tháo nút ống tiêm, nhẹ nhàng gắn đầu kim 27G.
Bước 3	Dùng nước muối và cồn vàng sát khuẩn.
Bước 4	Xác định điểm 7 + 2 điểm cấy
Bước 5	Chườm đá vào điểm cấy khoảng 30s và cấy sản phẩm.
Bước 6	Đắp mặt nạ giảm sưng giảm đỏ. Thời gian sau có hiệu quả khi cây xong sẽ thấy hiệu ứng khuôn mặt được đầy đặn hơn. 3 tuần sau da cần mọng ngậm nước.

- * *Tiêm BAP hay còn gọi Bio Aesthetic Points là kỹ thuật tiêm điểm thẩm mỹ sinh học vào các vị trí dây chằng ở $\frac{2}{3}$ gương mặt dưới. Dưỡng chất thường sử dụng trong phương pháp này là hyaluronic acid (HA) nồng độ cao. Sau khi bác sĩ tiêm, dưỡng chất sẽ khuếch tán ra khắp mặt.*

BEFORE




TRƯỚC

AFTER



SAU

TRƯỚC

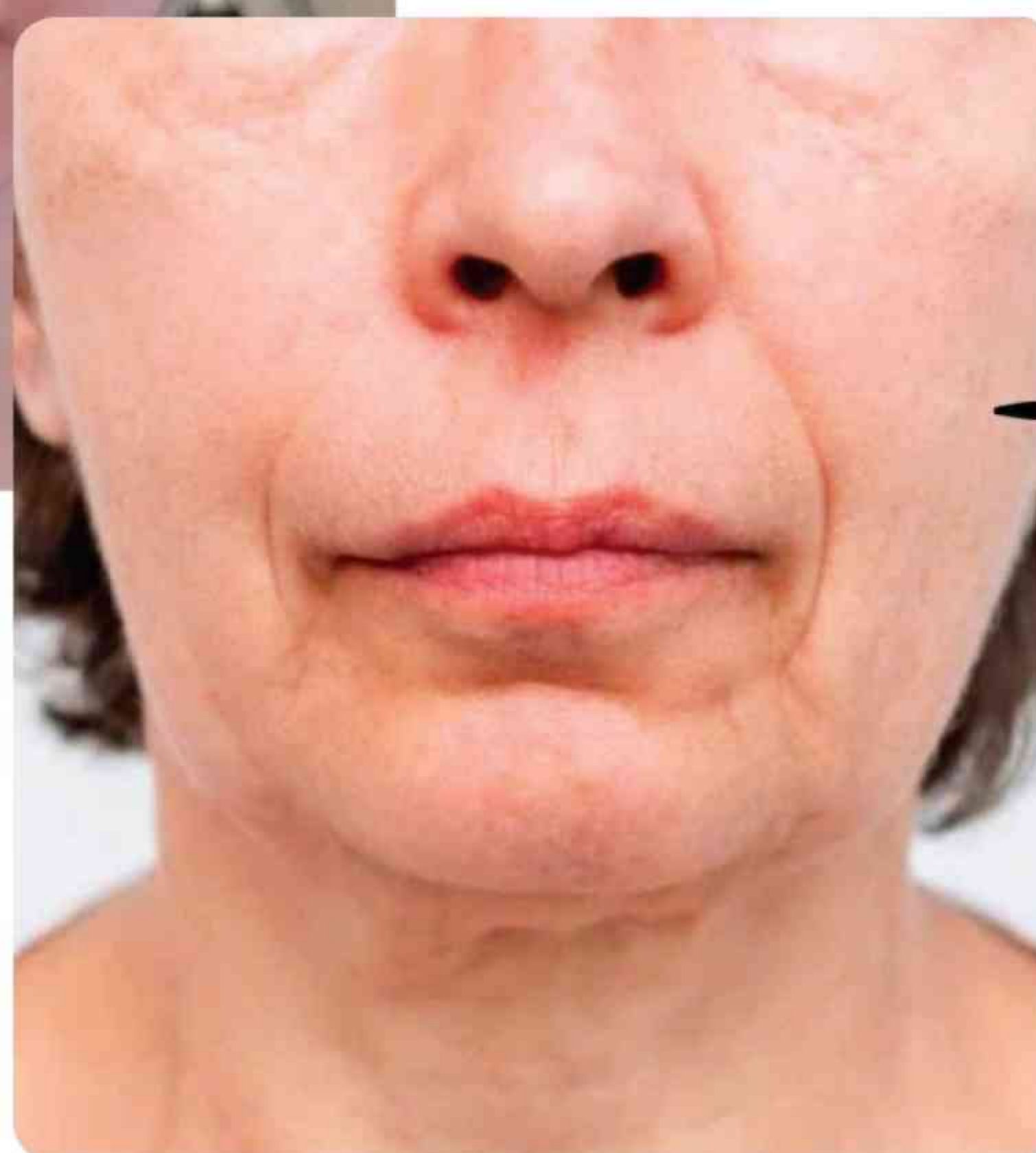


SAU



QUY CÁCH SẢN PHẨM



2.5 ml
1 ống/hộp

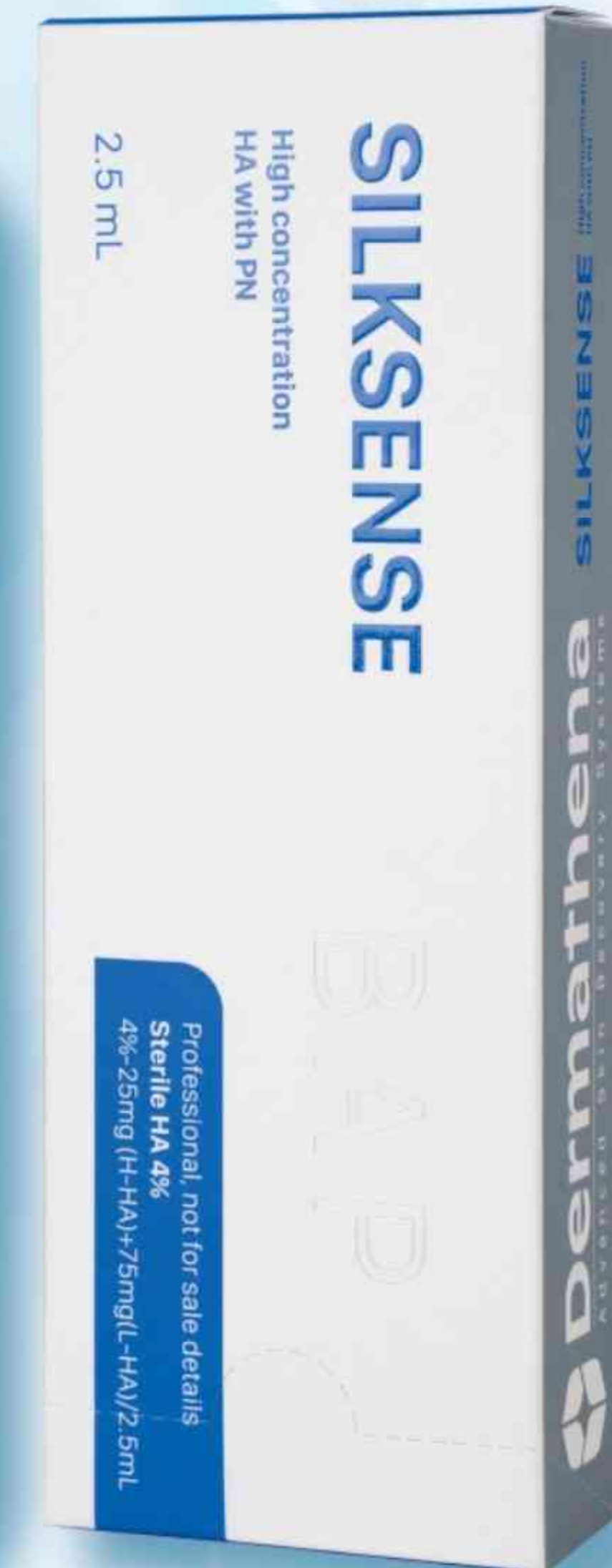



CÔNG TY TNHH EROS VIỆT NAM



VPGD Miền Bắc: 158 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, TP. Hà Nội
VPGD Miền Nam: D0508, Chung cư Opal Garden, Đường 20, Phường Hiệp Bình TP. Hồ Chí Minh
Tổng đài CSKH: 1900.8986
Email: tuvan.erosbeauty@gmail.com