



HỒ SƠ SẢN PHẨM

SILKSENSE PLLA

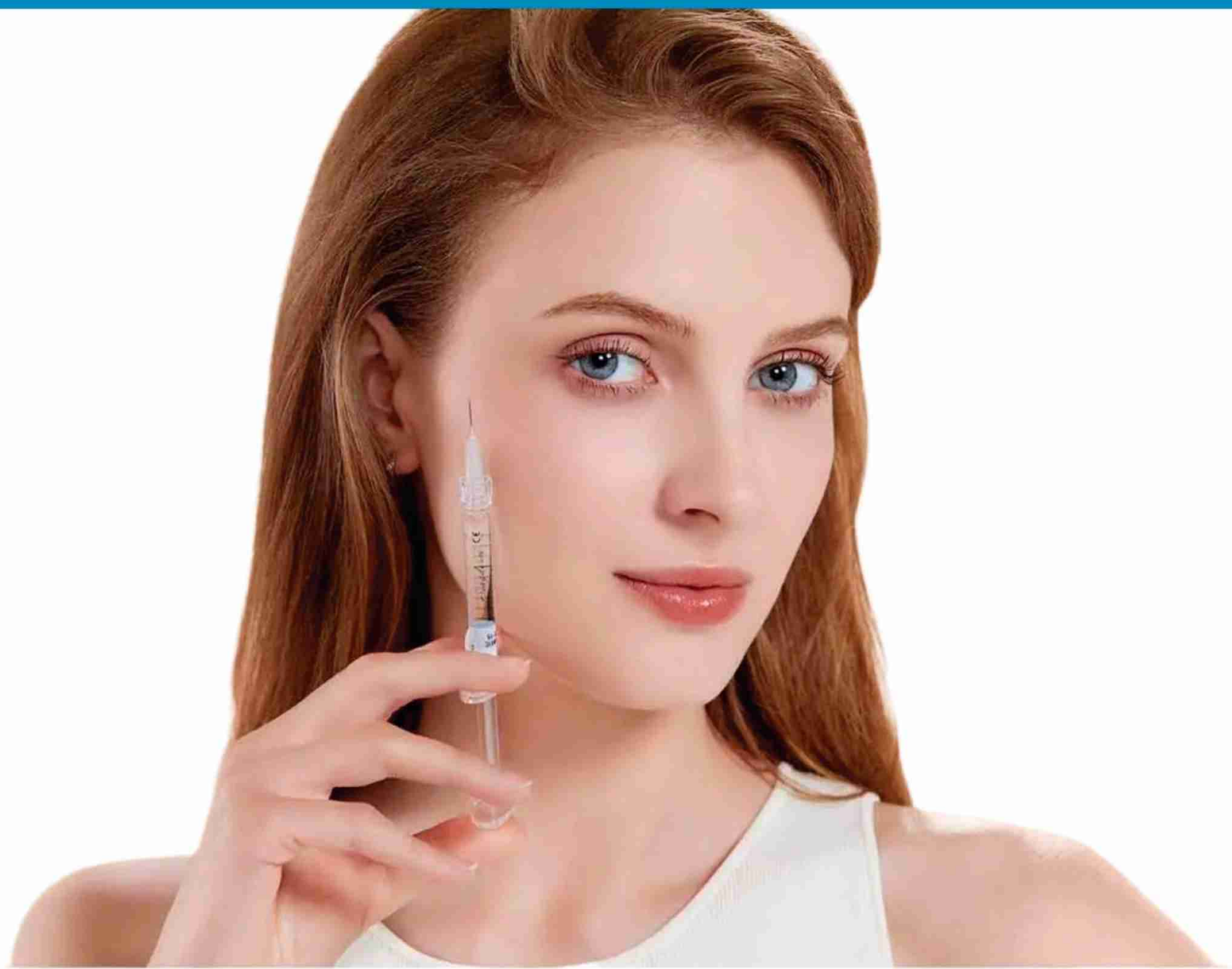

PLLA – GIẢI PHÁP TRẺ HÓA TOÀN DIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

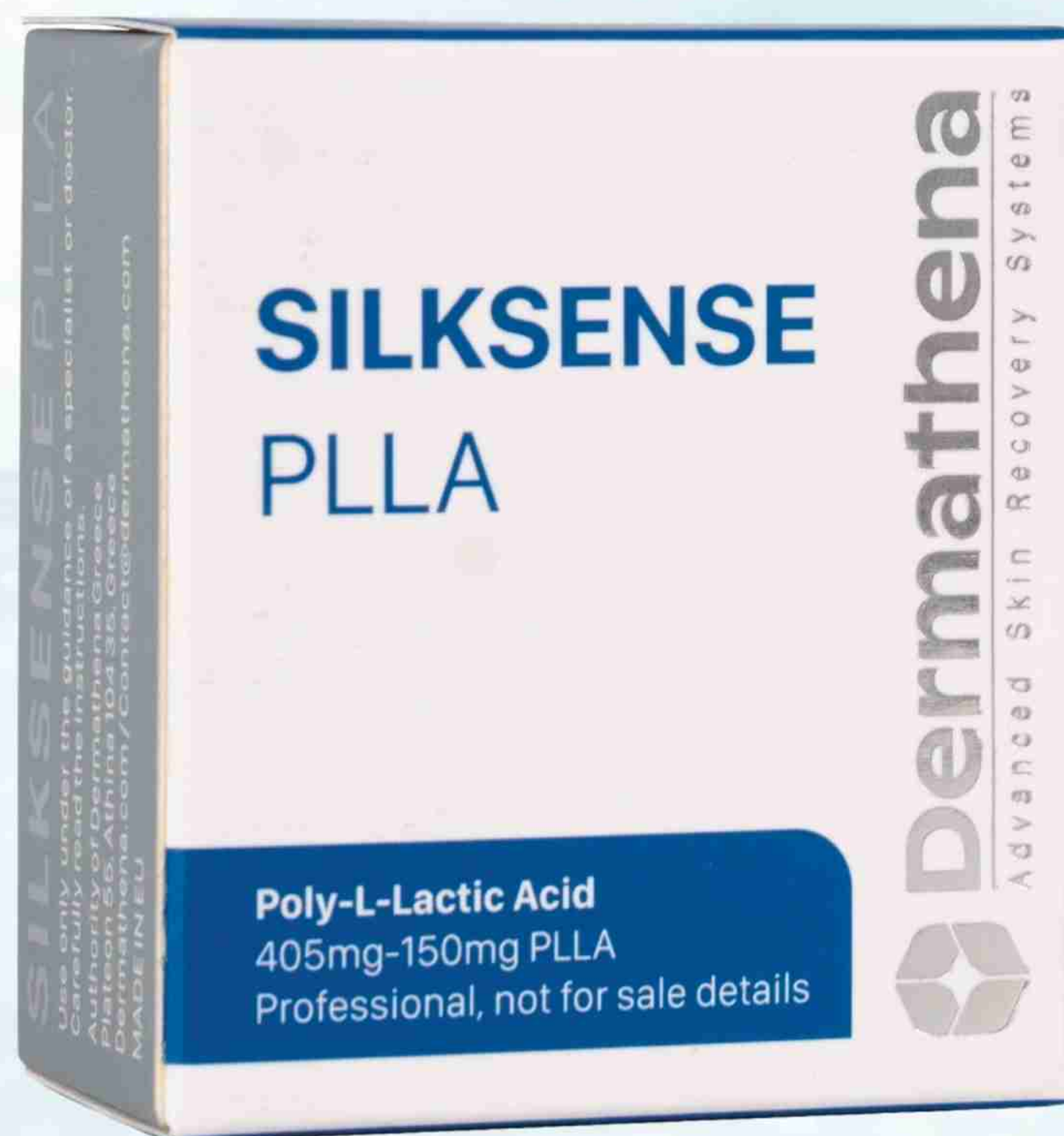



EROS

SILKSENSE PLLA

Loại sản phẩm	Skinbooster
Đóng gói	2 lọ/hộp
Khu vực sử dụng	Da mặt
Xuất xứ	Hàn Quốc



Đặc trưng

PLLA (Poly-L-Lactic Acid) là một loại axit hữu cơ tổng hợp có khả năng phân hủy sinh học, được ứng dụng trong y học thẩm mỹ để:

- *Tái tạo collagen nội sinh*
- *Làm dày mô da từ bên trong*
- *Cải thiện cấu trúc và độ đàn hồi da*
- *Hiệu quả kéo dài từ 12–24 tháng*

* Được FDA (Hoa Kỳ) và KFDA (Hàn Quốc) công nhận an toàn khi sử dụng đúng kỹ thuật.

Ứng dụng công nghệ sinh học cao cấp:

- Công nghệ tạo vì cầu không dung môi: không sử dụng các dung môi hữu cơ độc hại trong quá trình sản xuất
- An toàn sinh học tuyệt đối, không có tồn dư hóa chất trong sản phẩm
- Vì cầu tròn đều kích thước 20-80 microns, dễ pha – dễ tiêm – phân bố mượt mà dưới da
- Không gây tắc kim hay vón cục sau khi tiêm


Phương pháp bay hơi dung môi (phương pháp hiện tại)



Công nghệ sản xuất **không dung môi**



1. Kích thích nguyên bào sợi → tăng sinh collagen type I
2. Làm đầy mô từ từ trong 4–6 tuần
3. Tái tạo cấu trúc da → giúp da dày hơn – săn chắc – đều màu
4. Hiệu quả ổn định từ 3–6 tháng và duy trì đến 2–3 năm


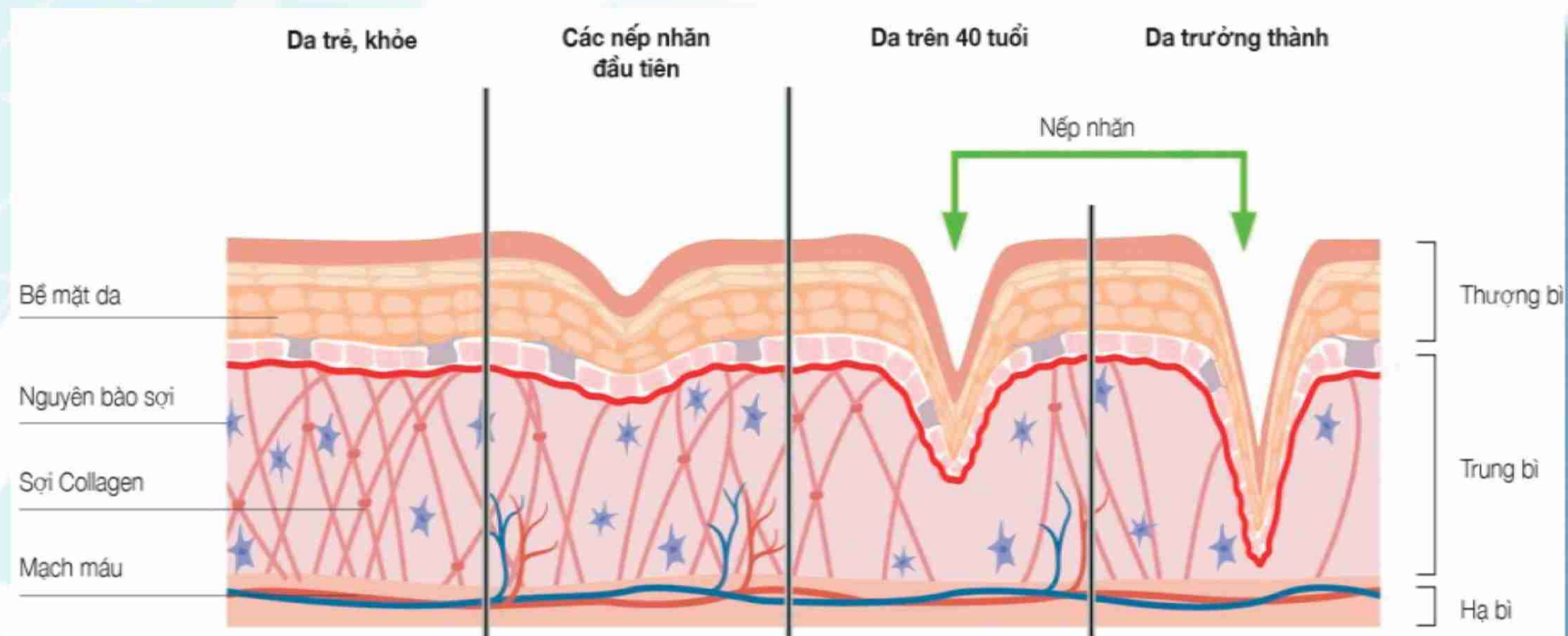


SO SÁNH CÁC DÒNG BỘT CHỈ TRÊN THỊ TRƯỜNG



Phân loại	Lycold	Ellanse	Aesthefill	SILKDERM
Nguyên liệu	DexTran + PMMA	PCL (Poly-Capro-Lactone)	PLA (Poly-Lactic-Acid)	PLLA (poly-L-Lactic-Acid)
Hiệu quả	24 tháng	24 tháng trở lên	18 đến 24 tháng	18 đến 24 tháng
Khoảng cách giữa các lần	1 ~ 2	1 (lặp lại sau 6 đến 8 tuần)	2-3cc (1 lần pha) 6-9cc (2-3 lần pha)	Cách 3 đến 4 tuần
Bắt đầu có hiệu quả	Ngay lập tức	Ngay lập tức	Sau 4 đến 6 tuần	Sau 4 đến 6 tuần
Trộn sản phẩm			Trộn từ 15-30 phút trước khi làm tiểu phẫu	Trộn từ 2-20 tiếng trước khi làm tiểu phẫu
Đặc tính	Dư lượng PMMA in vivo (ngghi ngờ tác dụng phụ)	Dung môi hữu cơ	Dung môi hữu cơ	Dung môi hữu cơ
Hình dạng hạt		Dạng cầu	Dạng cầu	Vô định hình

- Làm đầy các vùng lõm: má hóp, thái dương, rãnh cười, hàm dưới, trẻ hóa tay, chân
- Nâng cơ trung tầng tự nhiên – không phẫu thuật
- Cải thiện độ đàn hồi và cấu trúc nền da
- Tái tạo mật độ collagen cho da trung niên và lão hóa

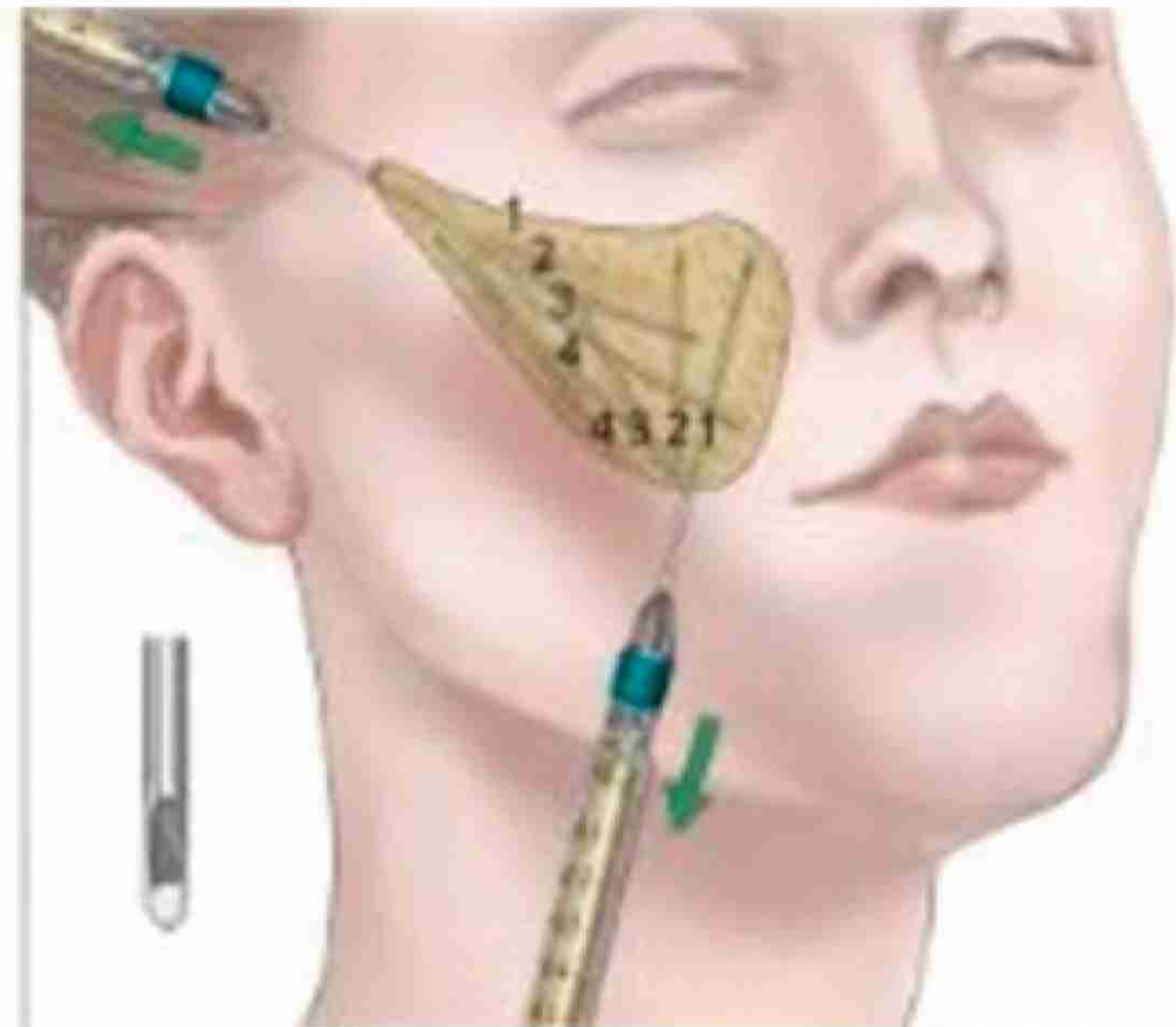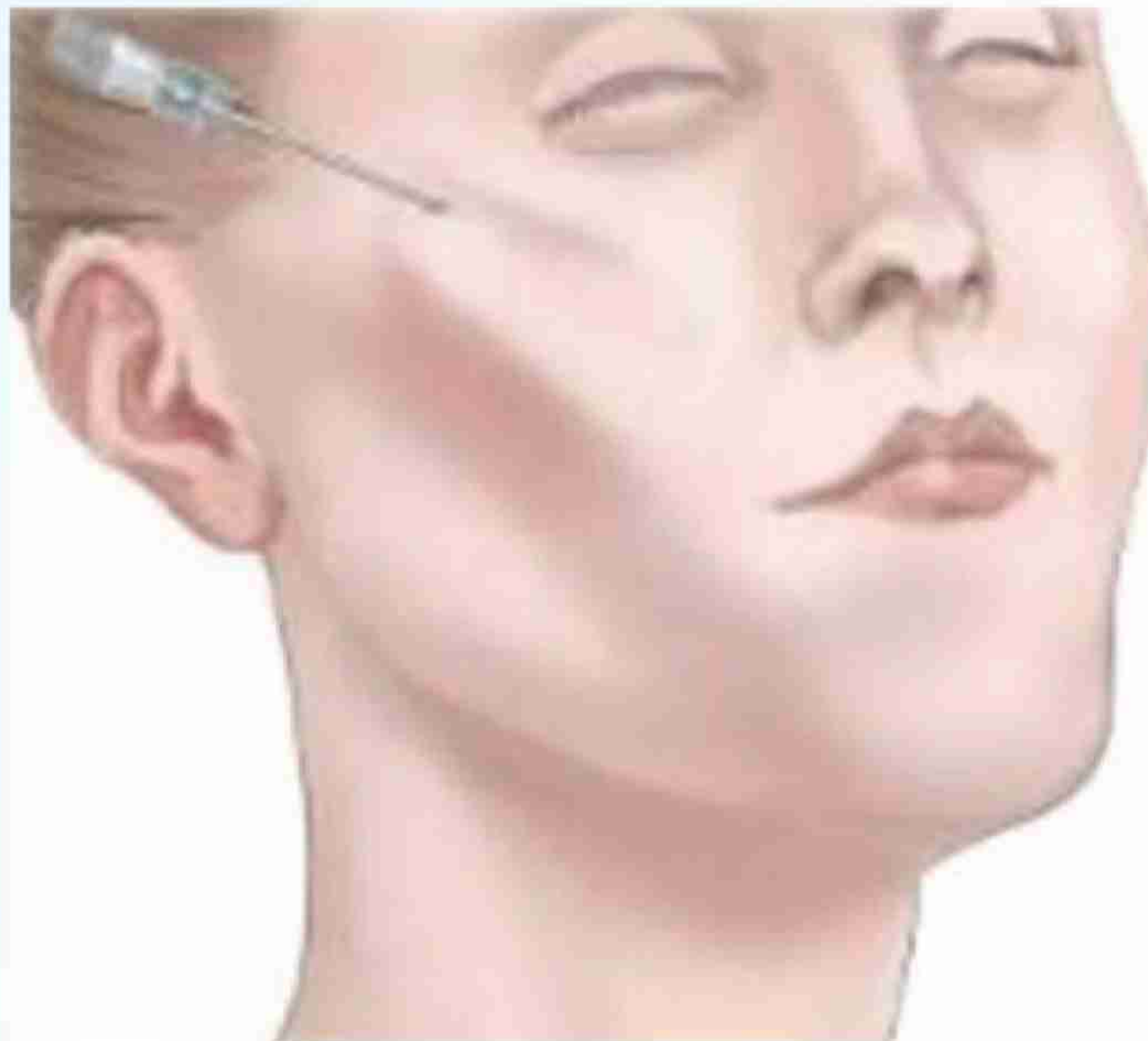


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Chuẩn bị:

- Pha 1 lọ PLLA với 6–7ml NaCl 0.9% + 1ml Lidocaine
- Lắc kỹ 15–30 phút để hòa tan hoàn toàn
- Dùng kim 18G để rút, sau đó chuyển sang Cannula 25G/27G để tiêm

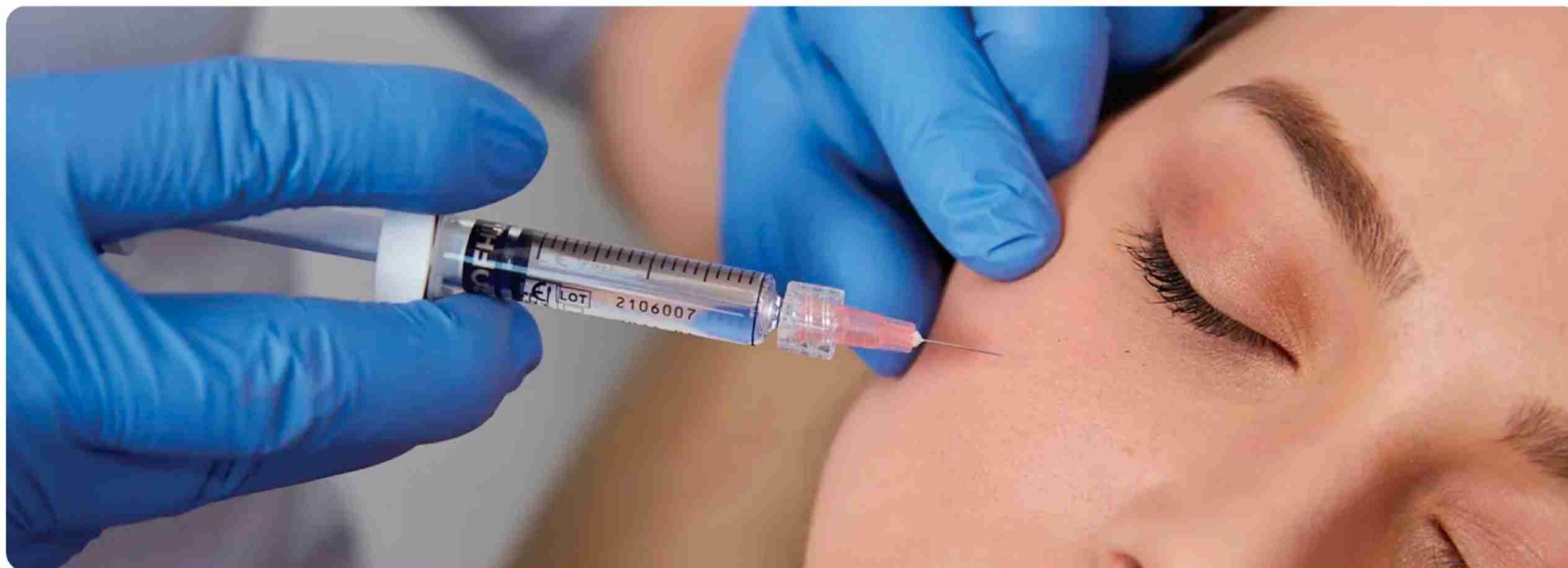

Kỹ thuật tiêm:

- Đi rải (fanning technique) – đưa kim vào 1 điểm chích và rải ra dạng quạt
- Tiêm vào lớp hạ bì sâu hoặc lớp dưới da nông
- Tiêm từ 0.05 – 0.1cc mỗi đường rải, tùy vùng và độ lõm

Vị trí tiêm:

- Rãnh cười, nếp nhăn khóe miệng
- Gò má – má hóp – thái dương lõm
- Hàm dưới – đường viền cằm
- Tuyệt đối không tiêm quá nông hoặc vào vùng môi, bọng mắt

HIỆU QUẢ THEO THỜI GIAN



01

An toàn
Hiệu quả tự nhiên

02

Lâu dài
Quy trình đơn giản
Không tác dụng phụ

03

Phân hủy sinh học
Hấp thụ sinh học

Giai đoạn	Diễn biến dưới da
Tuần 1-2	<i>Sưng nhẹ do hồi nước</i>
Tuần 4-6	<i>Kích thích collagen nội sinh</i>
Tháng 3-6	<i>Mô da dày lên rõ rệt – rãnh mờ hẳn</i>
Tháng 6-12	<i>Cấu trúc da ổn định – da sáng, đều màu</i>
12-24 tháng	<i>Duy trì hiệu quả, chậm phân hủy</i>

Nguyên lý 5-5-5



1. *Massage 5-5-5: 5 phút × 5 lần/ngày × 5 ngày liên tục*
2. *Không makeup, không chạm tay, không xông hơi trong 24h*
3. *Uống nhiều nước để cấp ẩm và hỗ trợ chuyển hóa*
4. *Che chắn khi ra nắng – tránh tia UV làm suy giảm collagen*

5

Năm lần mỗi ngày

5

Năm phút mỗi lần

5



Năm ngày sau tiểu phẫu

Để đạt được hiệu quả cao nhất, lúc đầu nên massage quanh khu vực sử dụng sản phẩm. Việc làm này khiến vật chất được tỏa đều, không bị vón cục, giảm nguy cơ gặp tác dụng phụ và mang lại kết quả như ý.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không áp dụng cho:

- Phụ nữ mang thai / cho con bú
- Người có da viêm, chàm, vết thương hở
- Người dị ứng với thành phần sản phẩm
- Cơ địa sẹo lồi hoặc phản ứng tăng sắc tố sau viêm

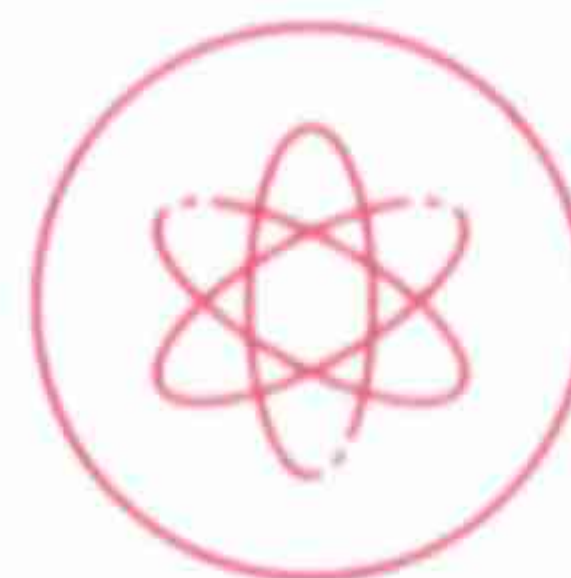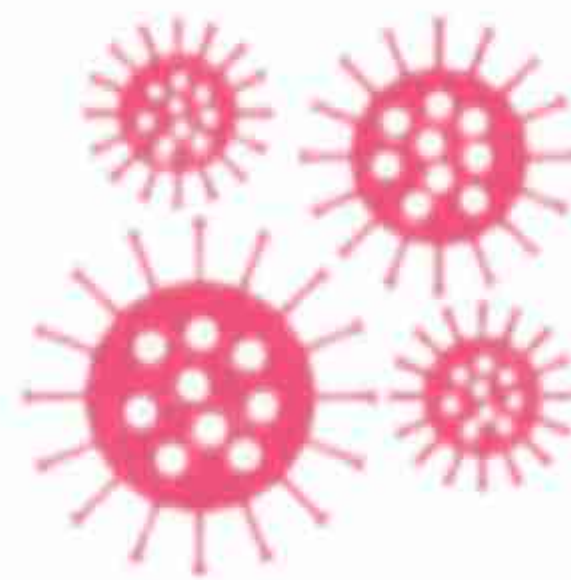

* Kỹ thuật viên cần nắm rõ lớp tiêm chính xác để tránh biến chứng và đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.



TRƯỚC



SAU



**ĐÃ CẤY
PLLA**

**CHƯA CẤY
PLLA**

PLLA là hoạt chất sinh học hiện đại, an toàn, giúp:

1. *Làm đầy – nâng cơ – tái tạo da từ sâu bên trong*
2. *Phù hợp với khách hàng có nhu cầu chống lão hóa tự nhiên, không phẫu thuật*
3. *Hiệu quả lâu dài, mang lại làn da săn chắc – căng mịn – trẻ trung*

QUY CÁCH SẢN PHẨM





CÔNG TY TNHH EROS VIỆT NAM



VPGD Miền Bắc: 158 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, TP. Hà Nội
VPGD Miền Nam: D0508, Chung cư Opal Garden, Đường 20, Phường Hiệp Bình TP. Hồ Chí Minh
Tổng đài CSKH: 1900.8986
Email: tuvan.erosbeauty@gmail.com